


IMAGEN DEL PRODUCTO	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
	Nombre:	Mascarilla protectora 3p con elástico
	Cantidad:	50 unidades por bolsa
	Material:	65% tela no tejida + 35% tela soplada en fusión
	Color:	Azul
	Nivel de protección:	70%, se debe usar máx. por 2 horas. (3 capas)

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Anti-olor
- Anti - PM2.5
- Anti-polen
- A prueba de polvo
- Evita evaporación
- 17,5 x 9,5 cm
- Aprobado por FDA
- EN149:2001+A1:2009
- GB/T 32610-2016 (Standard China)





# MASCARILLA PROTECTORA MULTIFUNCIONAL KN95

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- Coloque la mascarilla en su mano con la boquilla al alcance de sus dedos, manipulando los elásticos que se ajustarán a la parte posterior de sus orejas.
- 2.- Coloque la mascarilla debajo de su barbilla con la boquilla hacia arriba.
- 3.- Ajuste los elásticos detrás de sus orejas hasta que queden lo más cómodos posible.
- 4.- Acomode la mascarilla en su cara y moldee el ajuste nasal (pieza metálica sobre la nariz) para que no queden espacios por donde se pueda filtrar el aire.
- 5.- Cubra la parte delantera de la mascarilla con ambas manos. Inhale y exhale para corroborar que no existan filtraciones de aire ni sobre la nariz ni por los bordes de la mascarilla.

## ADVERTENCIAS DEL PRODUCTO

No se recomienda el uso de este producto en personas con barba, esto podría inhibir el contacto entre la cara y el borde de la mascarilla, provocando filtraciones.

- Este respirador ayuda contra ciertos contaminantes.
- Puede que no elimine el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
- El mal uso puede resultar en enfermedad o muerte.
- Los materiales que pueden entrar en contacto con la piel del usuario pueden causar reacciones alérgicas en personas susceptibles.